

































## QUIMIGAMA – GAMA GT

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 – Pronto para uso.  
Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: GGTE      Byname: GGTE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

**Assay:** Kinetic      **Blank Setup:**      **Wave 1:** 405      **Wave 2:** 700  
**Decimal:** 0      **Unit:** U/L      **Priority:** \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

**Y=ax+b**      **Factor:**      **Substrate exhaust limit** 2.500  
**a** 1.00      **Direction:** Positive  
**b** 0.00

**Test of Calibration:** 1      **STD Number:** 1  
**STD Position and Value:** \*      **Calibration rules:** 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

**R1 Setup:**  
**Volume (uL):** 160.0      **Position:** \*      **Incubation Time (s):** 54  
**R2 Setup:**  
**Volume (uL):** 40.0      **Position:** \*      **Incubation Time (s):** 130  
**Sample Vol. (uL):** 8.0      **Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle):** 10

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

**Linear Range:** 800.0      (\*) inserido pelo usuário  
 Abs Warning  
 Superlinear auto retest

Sample       Predilute

® Marca registrada de seus proprietários











## QUIMILIP – LIPASE

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:** Reagente 1 – Pronto para uso.  
Reagente 2 – Pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Padrão de Lipase incluso no kit.	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: LIPAE      Byname: LIPAE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: Kinetic      Blank Setup:      Wave 1: 578      Wave 2:

Decimal: 0      Unit: U/L      Priority: \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b      Factor:

a      1.00      Direction: Positive

b      0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1

STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

**R1 Setup:**  
Volume (uL): 200.0      Position: \*      Incubation Time (s): 300

**R2 Setup:**  
Volume (uL): 50.0      Position: \*      Incubation Time (s): 120

Sample Vol. (uL): 4.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 10

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 300      (\*) inserido pelo usuário

Abs Warning       Sample       Predilute

Superlinear auto retest

® Marca registrada de seus proprietários











## QUIMIALT – ALT/TGP

- ▶ Este protocolo foi produzido baseado em dados teóricos de análise, portanto finos ajustes podem ser necessários.
- ▶ Recomenda-se a leitura da instrução de uso antes da utilização do produto.
- ▶ **PREPARAÇÃO DO REAGENTE:** Reagente pronto para uso.

Calibração:	Controle de Qualidade:
Quimicalib – Calibrador Código: 7023/12023	Para avaliar o desempenho do teste, sugere-se a utilização dos controles Ebram: Quimicontrol – Soro Controle Normal – Código: 7024/12024 Quimicontrol – Soro Controle Anormal – Código: 7031/12031

Name: TGPE      Byname: TGPE      Item Code: \*

### METHODOLOGY

Assay: Kinetic      Blank Setup:      Wave 1: 340      Wave 2: None

Decimal: 0      Unit: U/L      Priority: \*       Clean Before Test  
 Clean After Test

Y=ax+b      Factor:      Substrate exhaust limit 0.600

a 1.00      Direction: Negative

b 0.00

Test of Calibration: 1      STD Number: 1

STD Position and Value: \*      Calibration rules: 1-point linear

### REAGENT, SAMPLE AND TIME SETUP

R1 Setup:  
Volume (uL): 200.0      Position: \*      Incubation Time (s): 54

R2 Setup:  
Volume (uL): ---      Position: \*      Incubation Time (s): ---

Sample Vol. (uL): 20.0      Test Point (Test Time = Test Point x Test Cycle): 10

### NORMAL VALUE RANGE

	Normal L	Normal H
Blank:		
Male:		
Female:		
Child:		

Linear Range: 400.0      (\*) inserido pelo usuário

Abs Warning       Sample       Predilute

Superlinear auto retest

® Marca registrada de seus proprietários



