

UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES NOS ANALISADORES HEMATOLÓGICOS

A utilização dos analisadores de hematologia EB5600 e EB7600 requer a leitura obrigatória dos cartões específicos fornecidos juntamente com os produtos destinados a esses equipamentos.

- Código: 21910 - Ebraton - EBR5
- Código: 23920 - Ebralyse - A - EBR5
- Código: 23930 - Ebralyse - B - EBR5
- Código: 23940 - Ebralyse - C - EBR5

Dessa maneira, ressaltamos a importância da conferência e utilização dos cartões de forma correta.



- **Checar no recebimento se todas embalagens adquiridas estão com os cartões.**

Ao adicionar um novo reagente ao equipamento, é necessário executar a leitura do cartão correspondente. Para realizar essa leitura, acesse a tela de SERVIÇO > CONTROLE DE REAGENTE, selecione o reagente a ser substituído, clique em CONFIG e efetue a leitura do cartão no leitor do equipamento.



É importante realizar a leitura do cartão durante a substituição do reagente, pois caso contrário, o equipamento poderá enfrentar problemas relacionados à quantidade de ciclos disponíveis.



CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- 1** Realizar a leitura do cartão somente ao substituir o reagente no equipamento;
- 2** NUNCA aproveitar o volume remanescente do reagente em uso;
- 3** NUNCA completar o novo reagente com o volume do frasco anterior.
- 4** Se o cartão apresentar problema de leitura, guarde-o para enviá-lo à Ebram. Sem o cartão com defeito, não será possível o receber a reposição.

Qualquer dúvida, estaremos à disposição.

Obrigado!

